


# MeriScreen™ | HIV 1-2 WB


Test imunocromatografic calitativ într-o singură etapă pentru detectarea anticorpilor împotriva HIV-1 inclusiv sub-tipul C și HIV-2 în sânge uman, plasmă și sânge

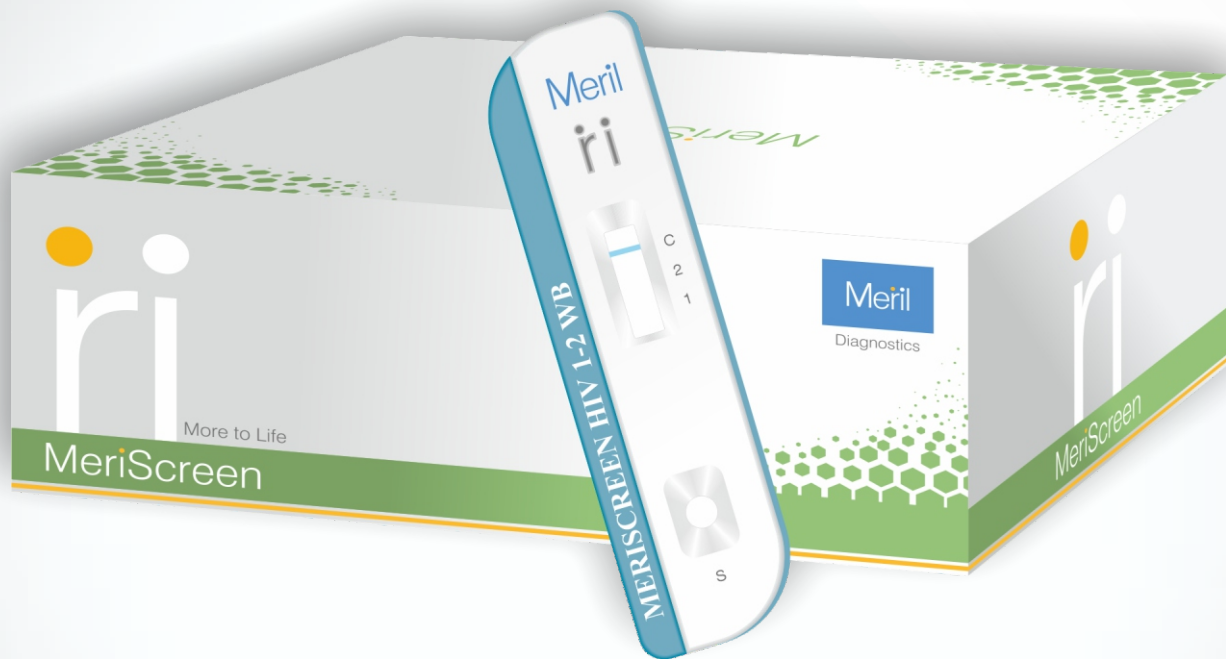

## SPECIFICATII

- Test de imunocromatografie
- Detectarea anticorpilor IgM, IgG și IgA
- Tipul probei: ser, plasmă, sânge integral (deget și venos)
- Volumul probei: 10  $\mu$ l ser/plasmă sau 20  $\mu$ l sânge
- Volumul buffer: 3 picături
- Rezultate după 20 de minute, dar nu mai târziu de 30 de minute
- Sensibilitate de diagnostic: 99,5%
- Specificitatea diagnosticului: 99,0 %
- Perioada de valabilitate de 24 de luni

## PROTOCOL DE TEST

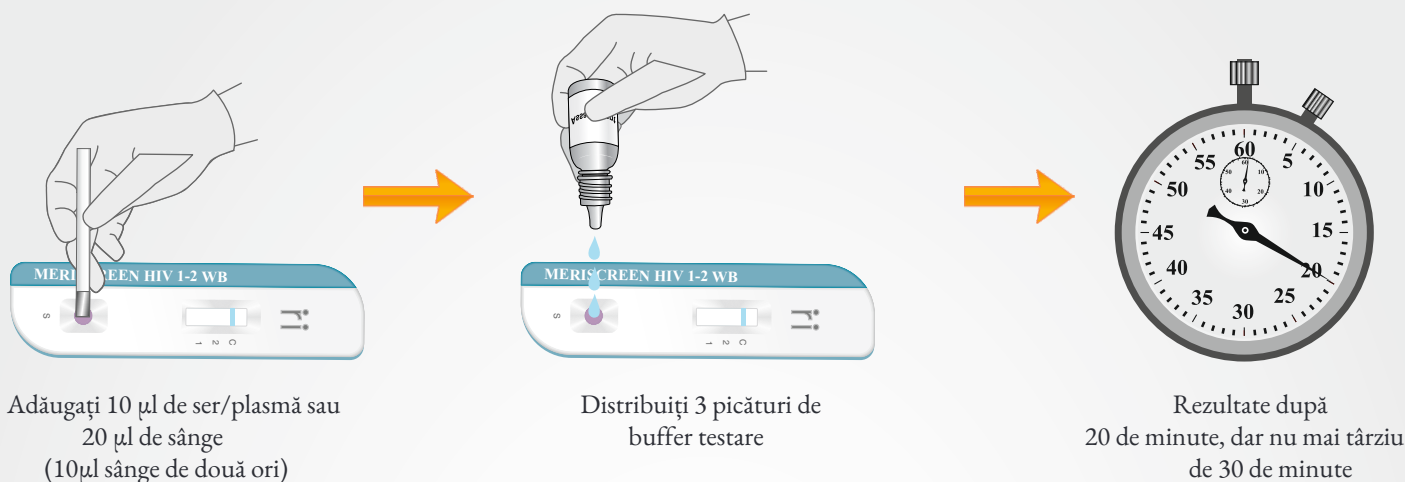

## INTERPRETARE

Non-Reactive	Reactive			Invalid			
	Mixed Infection	HIV-1 Infection	HIV-2 Infection				

Nicio linie roz-violet în regiunea „C” chiar și după adăugarea probei și a tamponului de analiză indică un test invalid